

Slik parer du dine Høreapparater med en Android telefon

ReSound GN

1. Slå av eller plasser dine høreapparater i laderen
2. På din telefon gå til Innstillinger og slå på Bluetooth
3. Gå til Google Play og i søkefeltet skriv- ReSound Smart 3D- last ned appen
4. Åpne appen og trykk «kom i gang»
5. Følg instruksjonene på skjermen- Husk å tillate bruk av Bluetooth samt aktivering av stedstjenester («Alltid»)- Du er nå klar for å bruke Smart 3D



Feilsøking ved generelle utfordringer med paring mot din Android telefon:

1. Slå av eller plasser høreapparatene i laderen
2. Gå til Bluetooth på telefonen- Forsikre deg om at ingen GN produkter er parert til Bluetooth - Hvis så, trykk Glem disse
3. Slå på Flymodus på telefonen
4. Gå til Innstillinger- Apper- Smart 3D
5. Trykk «Tving stopp»
6. Trykk på lagring og Buffer- Tøm lagring
7. Slå av Flymodus på telefonen
8. Slå på stedstjenester
9. Slå på høreapparatene
10. Åpne Smart 3D appen
11. Trykk på kom i gang
12. Følg instruksjonene på skjermen- Husk å tillate bruk av Bluetooth samt aktivering av stedstjenester («Alltid»)- Du er nå klar for å bruke Smart 3D

Se ellers mange nyttige tips på vår Nettside:

<https://www.resound.com/nb-no/help/apps/smart-3d>

Tilgjengelighet

Smart 3D App er kun tilgjengelig på telefoner med Android versjon 7 eller nyere. Direkte streaming av lyd er kun tilgjengelig til utvalgte Android telefoner med følgende spesifikasjoner:

- Android OS versjon 10.0 med ASHA funksjon
- Bluetooth® versjon 5
- Quattro med Firmware versjon 0.43

Hvilken App skal jeg bruke?

Smart 3D: Linx 3D, Enzo 3D, Linx Quattro, Enzo Q. Denne appen er tilgjengelig til de fleste nyere smarttelefoner

Smart App: Linx 1-2, samt Enzo 1-2, UP Smart) Høreapparater fra 2014-2017. Tilgjengelig til iPhone og utvalgte Samsung telefoner.

W4Se komplett liste her: <https://www.resound.com/nb-no/help/compatibility>

GN Making Life Sound Better