

## Cómo emparejar sus audífonos con su dispositivo Android™

1. Vaya a **Google Play**. En el campo **Buscar** en la parte superior, introduzca el nombre de la aplicación y descárguela.
2. Una vez descargada, abra la aplicación y toque **Comenzar**.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse y ¡listo!

**NOTA:** Si anteriormente había vinculado algún audífono, debe desvincularlo en el menú Bluetooth del teléfono smartphone antes de realizar una nueva vinculación.

## Si necesita volver a emparejar su dispositivo iOS

1. Comience eliminando el emparejamiento anterior yendo al menú **Ajustes**.
2. Baje en la pantalla hasta encontrar y seleccionar **Accesibilidad**.
3. Seleccione **Dispositivos de audio**.
4. Pulse sobre el nombre de sus audífonos, desplácese hacia abajo y seleccione Olvidar este audífono.
5. Apague y vuelva a encender su dispositivo iOS y vuelva a emparejar los audífonos con el dispositivo. Si necesita mas información, contacte con su audioprotesista.

**Fabricante**  
GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Tel.: +45 4575 1111  
resound.com

© 2019 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada de GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

ReSound GN



M201466ES-19.08-Rev

## Guía rápida de conexión

Aplicaciones ReSound Smart 3D™ y ReSound Smart™

GN Making Life Sound Better  
FOR 150 YEARS

## Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Hemos creado esta aplicación para que resulte para usted fácil y agradable de utilizar y controlar los audífonos desde su teléfono o dispositivo móvil.

Para obtener información sobre qué teléfonos y dispositivos móviles son compatibles con la aplicación, visite: [resound.es/compatibilidad](https://resound.es/compatibilidad).

la aplicación, debe vincular su teléfono o dispositivo móvil con los audífonos. Es muy sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos.

## Cómo emparejar los audífonos con su dispositivo iOS

1. Apague los audífonos.
2. Active **Bluetooth**® yendo al menú **Ajustes** en su dispositivo iOS. El control deslizante se vuelve verde al activar Bluetooth.



3




4

**NOTE:** a partir de iOS 13 y versiones posteriores.

3. Vuelva al menú principal de **Ajustes** y seleccione **Accesibilidad**.
4. Baje por la pantalla hasta encontrar **Compatibilidad con audífonos**.

5. Encienda los audífonos. Ahora su dispositivo iOS podrá detectar los audífonos.

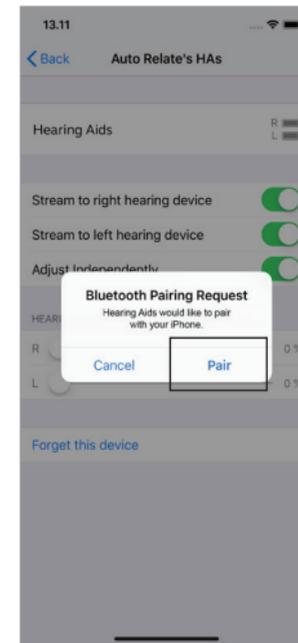

6

6. Pulse sobre **Emparejar**.
7. Vaya a **App Store** y en el campo de **búsqueda** en la parte superior introduzca el nombre de la aplicación.
8. Descargue la aplicación, ábrala y pulse **Comenzar**.
9. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a la aplicación y ¡listo!.

